

## Prozessablauf mit FoundationOne®Liquid



### Bestellung:

Der Onkologe fordert die umfassende Mutationsanalyse online unter [www.foundationmedicine.de](http://www.foundationmedicine.de) oder telefonisch unter **+49 7624 14 20 98**, per Fax unter **+49 7624 14 38 46** oder per Email an [germany.foundationmedicine@roche.com](mailto:germany.foundationmedicine@roche.com) an.

### Versand des Kits:

Der Roche Customer Service versendet das Blutentnahmekit, das Bestellformular, die Patienteneinwilligungserklärung sowie das Anforderungsformular (TRF) mit weiteren Hinweisen zum Probenhandling an den Arzt.

### Probenlogistik:

Die mit 2 x 8,5 ml Blut des Patienten befüllten Entnahmeröhrchen werden nach Rückmeldung durch den Onkologen innerhalb von 24 Stunden durch einen Logistikpartner abgeholt\* und zur Analyse zu Foundation Medicine in Cambridge, USA gesandt.

### Sequenzierung und Analyse:

Die Blutproben werden im Foundation Medicine Labor sequenziert und analysiert. Es wird ctDNA isoliert und insgesamt werden 70 krebsassoziierte Gene sowie der MSI-Status mittels Hybrid-Capture Next Generation Sequencing-Verfahren untersucht, um ein umfassendes Tumorprofil des Patienten zu erstellen.

### Interpretation der gefundenen Ergebnisse:

Ein Team von medizinischen Experten bei Foundation Medicine, Inc. bewertet die Daten der spezifischen Mutationen nach aktuellem Stand von Medizin und Wissenschaft hinsichtlich gezielter Therapien oder klinischer Studien für eine personalisierte Behandlung des Patienten.

### Übermittlung des Berichtes:

Foundation Medicine, Inc. sendet den Befund mit dem umfangreichen Ergebnisbericht des Patienten per verschlüsselter eMail zurück an den beauftragenden Arzt.

\* Innerhalb von 5 Tagen muss die Probe im Analyselabor eingetroffen sein. Probenversendung über das Wochenende ist nicht möglich.

# FoundationOne®Liquid – Tumorprofiling solider Tumore durch Liquid Biopsy

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne  
jederzeit zur Verfügung

## Ihr Kontakt zu uns:

[www.foundationmedicine.de](http://www.foundationmedicine.de)

[germany.foundationmedicine@roche.de](mailto:germany.foundationmedicine@roche.de)

Fon: +49 7624 14 20 98

Fax: +49 7824 14 38 46

## Disclaimer:

Therapieentscheidungen liegen in der ärztlichen Verantwortung. Die im Report erwähnten Arzneistoffe sind möglicherweise für bestimmte Patienten nicht geeignet. Die Auswahl eines, aller oder keiner der Arzneistoffe liegt vollständig im Ermessen und der Verantwortung des behandelnden Arztes. Roche und Foundation Medicine® übernehmen keine Haftung für die Vollständigkeit der im Report zu findenden Informationen. Ein klinischer Nutzen wird nicht garantiert: Roche und Foundation Medicine® machen keine Versprechungen und geben auch keine Garantie dafür, dass ein bestimmter Arzneistoff für die Behandlung der Erkrankung bei einem Patienten wirksam sein wird bzw. dass eine Substanz mit fehlendem potentiellen klinischen Nutzen auch tatsächlich keinen klinischen Nutzen hat. Eine Erstattung wird nicht garantiert. Roche und Foundation Medicine® machen keine Versprechungen und geben auch keine Garantie, dass sie selbst oder eine dritte Partei, gleichgültig ob privat oder staatlich, einem Patienten die Kosten für FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid und FoundationOne®Heme erstatten werden.

Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt. © 2018 Roche Pharma AG, Emil-Barell-Str. 1, 79639 Grenzach-Wyhlen

Roche ist der lizenzierte Anbieter von Foundation Medicine®-Produkten außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Der FoundationOne®Liquid-Assay des Herstellers Foundation Medicine, Inc., 150 Second Street, 1st Floor, Cambridge, MA 02141, USA ist nach IVD-Richtlinie 98/79 EG der Europäischen Union zertifiziert und durch Foundation Medicines autorisiertem EU-Vertreter, Qarad b.v.b.a, Ciplastraat 3, 2440 Geel, Belgien für die CE-Kennzeichnung registriert.

© 2018 Foundation Medicine, Inc. Foundation Medicine® und FoundationOne®Liquid sind eingetragene Warenzeichen



FOUNDATION  
MEDICINE®

